


MYCOPLASMA IES KIT

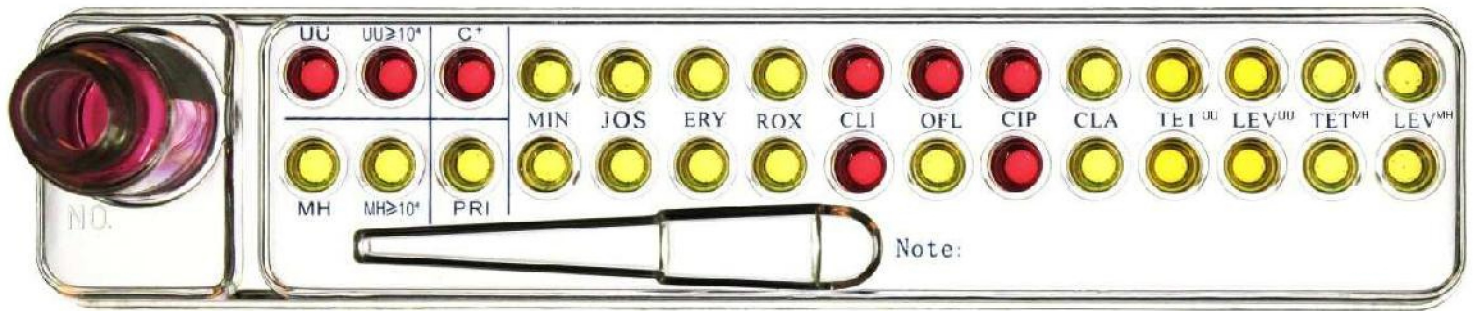

CULTURE-IDENTIFICATION-NUMÉRATION-ANTIBIOGRAMME

Mycoplasma hominis & Ureaplasma urealyticum

- Manipulation simple et rapide
- Résultats en 24 heures (37°C)
- Excellentes performances*
sensibilité: 98,8% spécificité: 96,6%
* évaluation Hopital Universitaire –Rome
- Identification directe:
Mycoplasma hominis (arginase)
Ureaplasma urealyticum (uréase)
- Numération directe:
Rendue en $<$ ou $\geq 10^4$ mycoplasmes/ml
- Large gamme d'antibiotiques
11 antibiotiques appartenant à
5 familles sont testés à 2 concentrations*
Résultat rendu en
« Sensible, Intermédiaire* ou Résistant »
*sauf Pristinamycine
- Tarif très compétitif



Référence produit: M0205

Coffret complet de 20 tests Fabriqué par Autobio

MODE OPÉRATOIRE:

1) Prélèvement

Chez la femme: Sécrétions cervicales, vaginales prélevées sur écouvillon. Chez l'homme: Sécrétions urétrales prélevées sur écouvillon ou urine. Un milieu de transport type UTM est également utilisable

2) Reconstitution du milieu de culture: un flacon de diluant est rajouté à un flacon de milieu déshydraté.

N.B. Variante: le flacon de diluant peut servir de milieu de transport pour le prélèvement.

3) Inoculation: l'écouvillon ou 500µl d'urine ou 400µl de milieu UTM, est déchargé dans le milieu de culture reconstitué,
N.B. Variante: le diluant inoculé sert alors à reconstituer le milieu de culture.

4) 100 µl d'inoculum sont déposés dans chacune des 30 cupules de la galerie.

5) Ajouter une goutte d'huile minérale dans chaque cupule. Incuber 24 heures dans une étuve à 37°C.

6) Un changement de couleur du jaune au « rose, rouge-orange » indique une croissance des mycoplasmes, ou leur résistance aux antibiotiques.

ANTIBIOTIQUES TESTÉS: (nouvelles recommandations CLSI)

SYNERGISTINES (STREPTOGRAMINES): Pristinamycine (PTI)

MACROLIDES: Roxithromycine (ROX), Josamycine (JO), Clarithromycine (CLA), Erythromycine (ERY)

QUINOLONONES: Ofloxacin (OFL), Ciprofloxacine (CIP), Levofloxacine (LEV)

TETRACYCLINES: Tetracycline (TET), Minocycline (MIN)

LINCOSAMIDES: Clindamycine (CLI)

Distribution en France:

BIOLYS

200 rue Léon Blum
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.48.26.80
contact@biolys.net

cofrac
CERTIFICATION
DE SYSTEMES
DE MANAGEMENT

AB
certification
ISO 13485 : 2016
NUMERO DE CERTIFICAT N°A 1461

WWW.BIOLYS.NET