

PARASITRAP[®] DUAL ECO

BAILENGER & MILIEU ECO (MIF MODIFIÉ)

CONCENTRATION ET COLORATION ÉCOLOGIQUES DES PARASITES FÉCAUX

HELMINTHES: œuf et larves

PROTOZOAIREs: formes végétatives et kystes

- **Pratique, Hygiénique et Ecologique:**

Coffrets complets avec réactifs prêts à l'emploi et consommables à usage unique

Système de concentration clos et étanche assurant une manipulation très propre

2 techniques de concentration:

ECO (MIF sans mercure et sans formol) et **BAILENGER**

NOUVEAU:

le coffret **ECO-COMBI** (1 seul réactif combiné) **supprime** une étape et permet un **gain de temps**

- **Performant:**

Le **filtre breveté métallique** du système, à maillage très fin assure une **concentration optimale des parasites** dans le culot. La « propreté » du culot facilite la lecture

- **Économique:**

Conditionnement (25 MIF/ECO+25 BAILENGER)
Péremption longue: 18 mois
Prix compétitif



Fabriqué par BIOSEPAR (Allemagne)

MANIPULATION TRÈS SIMPLE:

1) Prélever l'échantillon de selles grâce à l'emporte pièce calibré fixé au bouchon du tube I.
Mélanger la suspension.

2) **Coffret DUAL ECO:**

Ajouter dans tous les tubes I: 1,25 ml de **milieu B**, puis dans les tubes MIF/ECO: 0,2 ml de **solution C**

Coffret DUAL ECO-COMBI:

rajouter uniquement 1,5 ml de **milieu Combi** dans tous les tubes I.

Attendre 10 à 15 secondes.

3) Visser le tube conique II (avec le filtre intégré) sur le tube I et retourner l'ensemble.

En le secouant, et/ou à l'aide d'un vortex faire passer l'échantillon du tube I dans le tube II à travers le filtre.

Attendre 1 à 2 minutes. Eliminer le tube I.

4) Centrifuger le tube II 5 à 10 minutes à 1500g. La dimension du tube II (63 mm x 17 mm) est compatible avec la plupart des centrifugeuses.

5) Après centrifugation, (formation de 4 phases) éliminer la couche grasse supérieure avec l'écouvillon fourni et vider la phase liquide.

Remettre le culot en suspension avec 0,5 à 1 ml de sérum physiologique, et examiner au microscope (grossissement 10 pour les gros éléments et 40 à 100 pour les protozoaires).

PARASITRAP DUAL ECO réf. 8486 DUALECO
PARASITRAP DUAL ECO COMBI réf. 8486 DEC

Distribution exclusive en France:



200 rue Léon Blum
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.48.26.80
contact@biolys.net

