

# SIMPLE NOROVIRUS

Test immuno-chromatographique sur cassette pour la détection rapide des *génogroupes GI et GII de Norovirus* dans les selles.

- **Pratique et Hygiénique:**

Présentation en test « cassette »

**Détection séparée et simultanée**  
des génogroupes GI et GII de Norovirus

- **Rapide:**

Une seule étape de réaction

**Résultat en 15 minutes**

- **Fiable\*:**

Comparaison par rapport à la RT-PCR

	Etude Interne	Etude Externe*
Sensibilité G I	82%	90,0%
Sensibilité G II	77%	82,6%
Spécificité	> 98%	> 99%

\* évaluations externes: Health Protection Agency (Londres)

- **Lecture facile**

bande rouge supérieure: **Norovirus G I**

bande bleue médiane: **contrôle**

bande rouge inférieure: **Norovirus G II**

- **Très petit conditionnement**

coffret de 5 tests unitaires

***nouveau et unique !***



Test fabriqué par OPERON (Espagne)  
Réf. produit: 9041.005.00 Coffret complet de 5 tests  
Code NABM 4221 Recherche directe de Calicivirus (EIA) B70

## MANIPULATION SIMPLE:

- 1) Déposer **3 gouttes (100µl) de selles liquides** ou 2 gouttes de selles semi-liquides ou 75 mg (noisette de 4 mm) de selles solides dans un microtube de 1,5 ml fourni.  
Ajouter **1 ml de diluant et agiter au vortex 30 s.**
- 2) **Centrifuger de préférence** le microtube pendant **5 minutes à 3000 tpm (= 700 g)**.  
(Il est toutefois possible de laisser sédimenter la suspension pendant 3 à 5 minutes).  
Le surnageant doit être clair avant analyse.
- 3) Déposer **4 gouttes (100µl) de surnageant** dans le puits rond de la cassette (ramenée à température ambiante si stockée au frais).
- 4) **Attendre 15 minutes et lire le résultat :**



**Résultat négatif:**  
**G I- G II-**



**Résultat positif:**  
**G I- G II+**



**Résultat positif:**  
**G I+ G II-**



**Résultat positif:**  
**G I+ G II+**

**BIOLYS**

Distribution exclusive en France:  
200 rue Léon Blum  
69100 VILLEURBANNE  
Tel : 04.78.48.26.80  
[contact@biolys.net](mailto:contact@biolys.net)

**cofrac**  
CERTIFICATION  
DE SYSTEMES  
DE MANAGEMENT  
ISO 13485 : 2016  
NUMERO DE CERTIFICAT N°A 1481