

SIMPLE 2 A-B *diff*

Test immuno-chromatographique sur cassette pour la détection rapide des Toxines A et B de *Clostridium difficile* dans les selles.

- **Pratique et Hygiénique:**

Présentation en test « cassette »

Détection séparée et simultanée
de la Toxine A et de la Toxine B

- **Rapide:**

Une seule étape de réaction

Résultat en 15 minutes

- **Fiable*:**

Comparaison par rapport au
«Gold Standard» (Cytotoxicité)

Concordance : 91,7 %

Spécificité : 94,4 %

V.P.N. : 96,2 %

* évaluations: Laboratoire de Microbiologie,
Centre Hospitalier Universitaire de Barcelone (Espagne)

- **Lecture facile**

bande rouge supérieure: **Toxine B**

bande bleue médiane: **contrôle**

bande rouge inférieure: **Toxine A**

- **Très petit conditionnement**

coffret de 5 tests unitaires



Test fabriqué par OPERON (Espagne)
Référence produit: 9038.005.00
Coffret complet de 5 tests

MANIPULATION SIMPLE:

- 1) Déposer **4 gouttes (100µl)** de selles liquides ou semi-liquides ou 75 mg (selles solides) ou quelques colonies (culture) dans un microtube de 1,5 ml fourni.
Ajouter **1 ml de diluant** et agiter au vortex **30 s**.
- 2) De préférence, **centrifuger** le microtube **5 minutes à 3000 tpm**.
Il est toutefois possible de laisser sédimenter la suspension pendant 5 minutes.
- 3) Déposer **4 gouttes (100µl)** de surnageant dans les puits de la cassette (ramenée à température ambiante si stockée au frais).
- 4) **Attendre 15 minutes et lire le résultat :**



Résultat négatif:
TcdA- TcdB-



Résultat positif:
TcdA+ TcdB-



Résultat positif:
TcdA- TcdB+



Résultat positif:
TcdA+ TcdB+

Distribution exclusive en France:

BIOLYS

200 rue Léon Blum
69100 VILLEURBANNE
Tel : 04.78.48.26.80
contact@biolys.net

cofrac
CERTIFICATION
DE SYSTEMES
DE MANAGEMENT
ISO 13485 : 2016
NUMERO DE CERTIFICAT N°A 1481
WWW.BIOLYS.NET